

メーカー別ペースメーカー等のメーカー意味

メーカー名	Medtronic	Abbott(St. Jude Medical)	BIOTRONIK	Boston Scientific	MicroPort(Sorin)
心房関連					
心房ペーシング	AP	AP	Ap	AP	Ap
心房センシング	AS	AS(黒背景に白文字)	As	AS	As
心房不応期センシング	AR/Ab	AS/R(黒背景に白文字)	Ars	(AS)[AS]	Ar
心室関連					
心室ペーシング	VP	VP	VP	VP	Vp
心室センシング	VS	VS(黒背景に白文字)	Vs	VS	Vs
心室不応期センシング	VR	VS/R(黒背景に白文字)	Vrs	(VS)[VS]	Vr
モードスイッチ					
モードスイッチ	MS	AMS	ModeSw	ATR-FB	表示なし
ICD関連					
VTセンシング	TS/TF	T/T1/T2	VT1/VT2	VT1/VT	Vs 【VT maj】
VFセンシング	FS	F	VF	VF	Vs 【VF maj】
心室抗頻拍ペーシング	TP	STIM 【ATP】	VP 【Burst/B + PES/Ramp】	VP	ATP/Vp
ショック送出	CV	(HV)	〇〇(数字)J	〇〇(数字)J Shk	〇〇(数字)J
CRT関連					
両心室ペーシング	BV	BP	RVp/LVp	RVP/LVP	bv



各メーカーの一部機種または特殊な表示メーカー

Medtronic心房ATP機能付きペースメーカーで使用するメーカー

	メーカー表示
AT/AF Sensing	TS
AT/AF Detection	TD
Atrial Tachy Pacing	TP
VT Monitor Detection	VT

Boston Scientific一部特殊表示メーカー

	メーカー表示
心房PVARP内センシング	(AS)
心房PVAB内センシング	[AS]
心室PVARP内センシング	(VS)
心室PVAB内センシング	[VS]

Abbott(St. Jude Medical)ペースメーカーの一部機種メーカー

	メーカー表示
心房ペーシング	A
心房センシング	P
心房不応期センシング	P(黒背景に白文字)
心室ペーシング	V
心室センシング	R
心室不応期センシング	R(黒背景に白文字)

MicroPort(Sorin)一部特殊表示メーカー

	メーカー表示
心房不応期ペーシング	An
心室不応期ペーシング	Vn

プログラマなどで表示される略語

VT(ventricular tachycardia)	心室頻拍
VF(ventricular fibrillation)	心室細動
VPC(ventricular premature contraction)	心室性期外収縮
AT(atrial tachycardia)	心房性頻拍
AF(atrial[auricular] fibrillation)	心房細動
PAC(premature atrial contraction)	心房性期外収縮
APCs(atrial premature contraction)	心房性期外収縮
SA(sinus arrhythmia)	洞性不整脈
sinoatrial(SA) node block	洞房ブロック
atrioventricular(AV) block	房室ブロック
WPW(Wolff-Parkinson-White)	WPW症候群
PSVT(paroxysmal supraventricular tachycardia)	発作性上室性頻拍症

参考文献

- ①「CDR認定取得」を目指すための業界指定講習会テキストⅡ(第10回).日本CDRセンター.平成28年7月23日
- ②植込み型心臓デバイス認定士公式テキスト.日本不整脈心電学会植込み型心臓デバイス認定士制度部会.2021年6月25日

